



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Het gebruik van de TrioClear™ app

BEGIN UW **TRIOCLEAR™** TRAJECT

Laten we uw glimlachtransformatie-traject beginnen. U kunt nu de TrioClear™ Aligner mobiele app downloaden om belangrijke functies te ontdekken, zoals:


1. Registreer dagelijks de draagtijd van uw aligners.
2. Maak foto's van uw mond voor voortgangsupdates naar uw tandarts.
3. Ontdek meer getransformeerde glimlachen binnen onze TrioClear™-gemeenschap.
4. Ontvang herinneringen en meldingen.

DE TRIOCLEAR™ ALIGNER
MOBIELE APP IS NU
BESCHIKBAAR OP:




TABLE OF CONTENTS



OPEN DE APP EN LOG IN	04
STARTPAGINA EN CASUSBEHEER.....	05
PATIËNTENBEHEER.....	07
PATIËNTINFORMATIE EN CASUSLOGBOEK.....	07
BEHANDELPLAN.....	08
FOTO'S GEMAAKT DOOR DE KLINIEK	10
FOTO'S GEMAAKT DOOR DE PATIËNT / GEGEVENS BIJHOUDEN DOOR DE PATIËNT.....	12
NIEUWE CASUS/ REFINEMENT	13
STANDAARD FOTO-OPNAMEN IN DE NIEUWE CASUS REFINEMENT.....	14
NIEUWE CASUS REFINEMENT.....	16
GALERIJ.....	18
INSTELLINGEN - MIJN APP-ACCOUNT.....	19

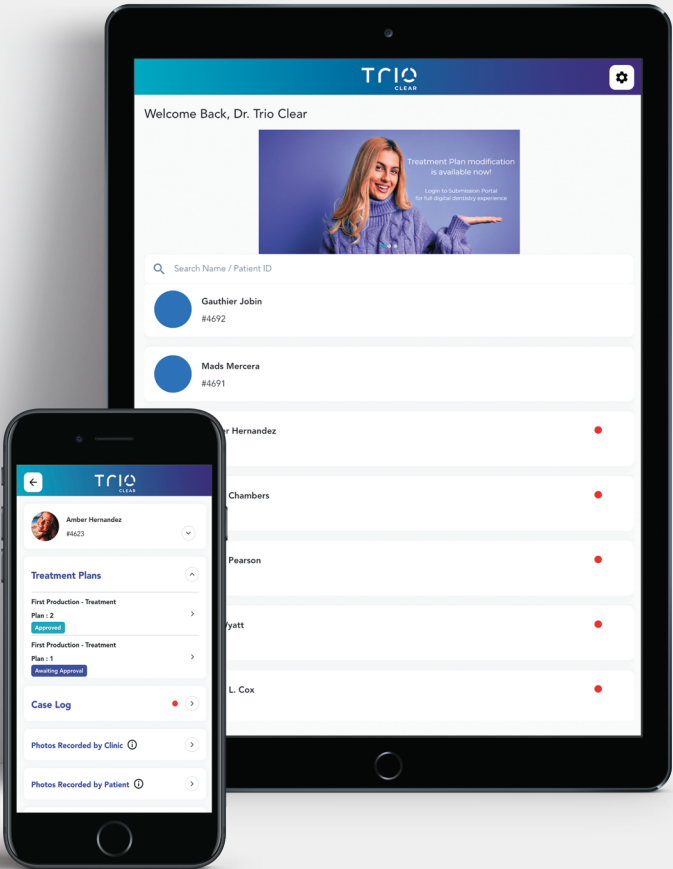

OPEN DE APP EN LOG IN

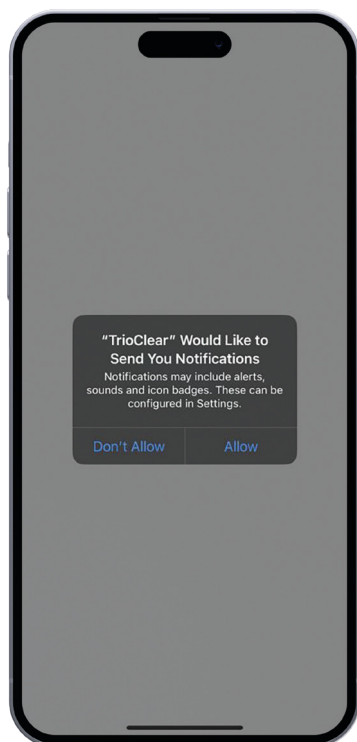

Schakel meldingen om updates te ontvangen van het casuslogboek

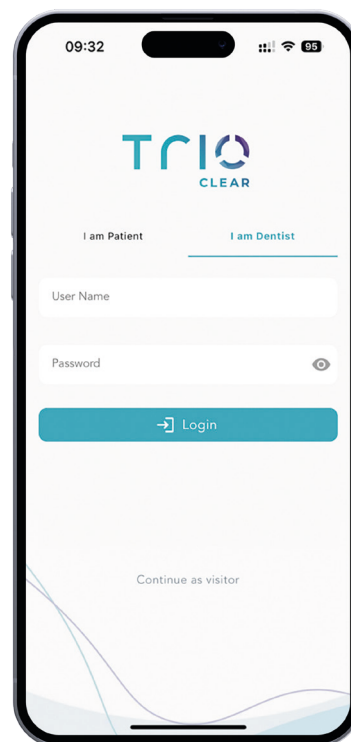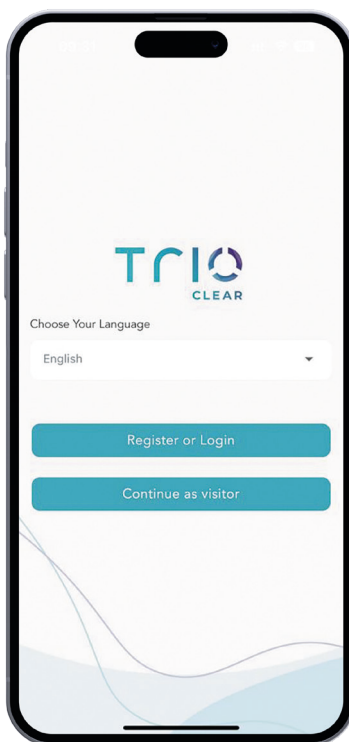


Selecteer “Ik ben tandarts” en log in.

Inloggen & Wachtwoord = inzendportaal
Inloggen ingesteld in echte gevallen

STARTPAGINA EN CASUSBEHEER

START

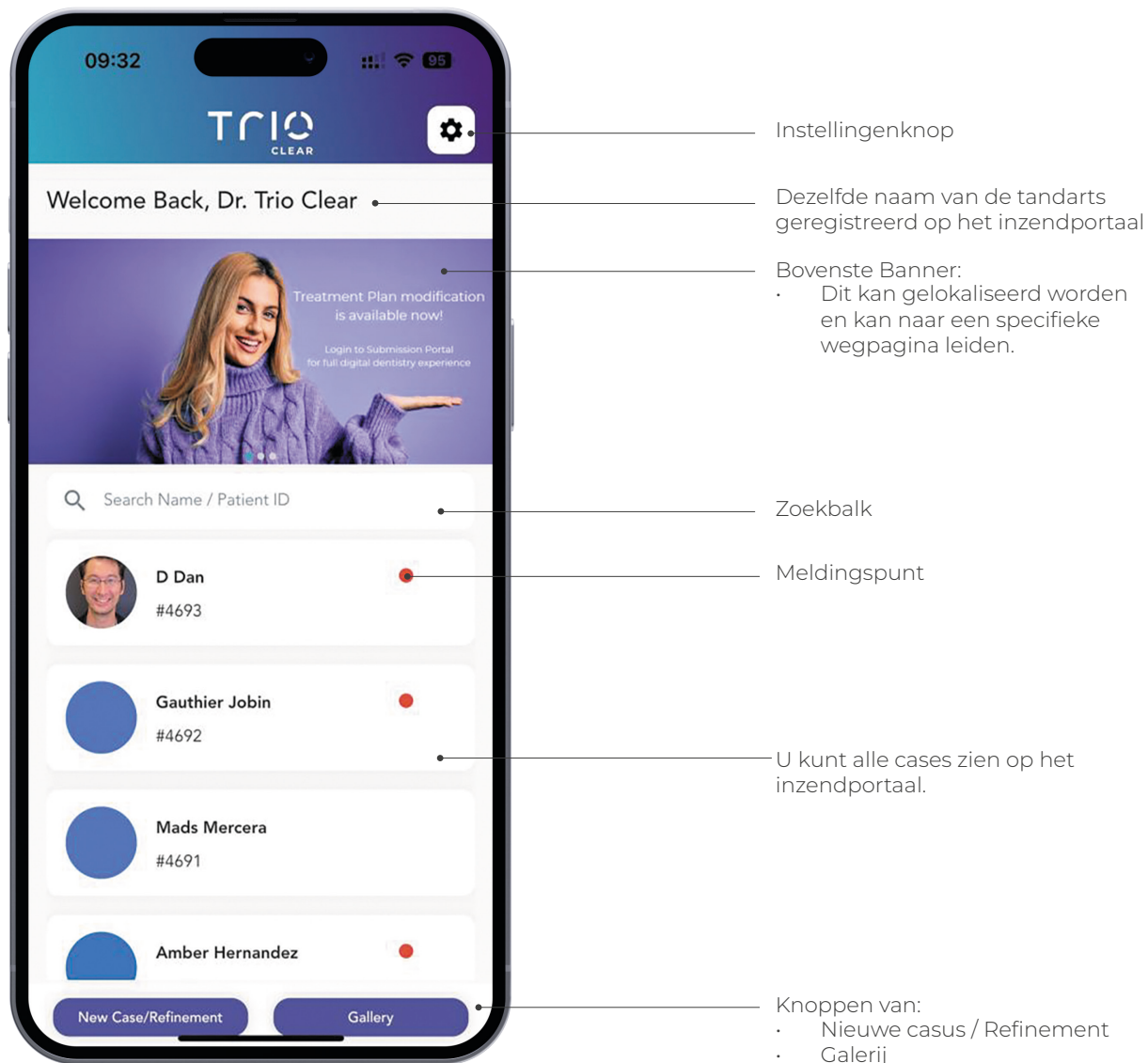


TRIOCLEAR™ MOBIEL APP KAN HET VOLGENDE DOEN:

- Bovenste Banner: Verbeterde optie voor marketingdoeleinden
- Bekijk casusinformatie. / patiëntinformatie.
- Bekijk behandelplan / casuslogboek
- Goedkeuren behandelplan
(Kan behandelplan niet wijzigen in mobiele interface)
- Maak foto's van patiënten en upload ze naar het inzendportaal
- Ontvang en volg vrijwillige foto-uploads van patiënten tijdens de behandeling
- Ontvang en volg vrijwillige uploads van patiënten over hun draagtijd van aligners


PATIËNTENBEHEER

Patiëntinformatie en casuslogboek

PATIËNTINFORMATIE

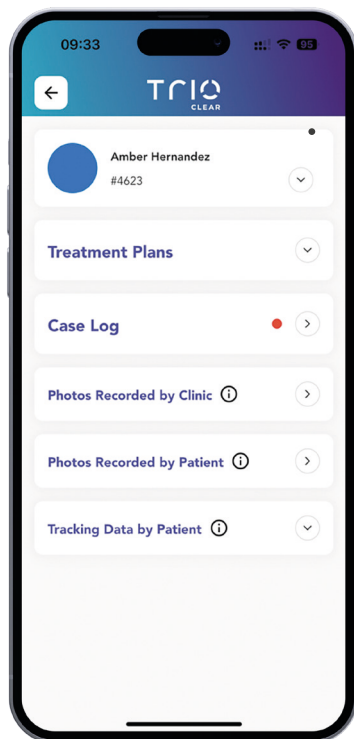


PATIËNTINFORMATIE

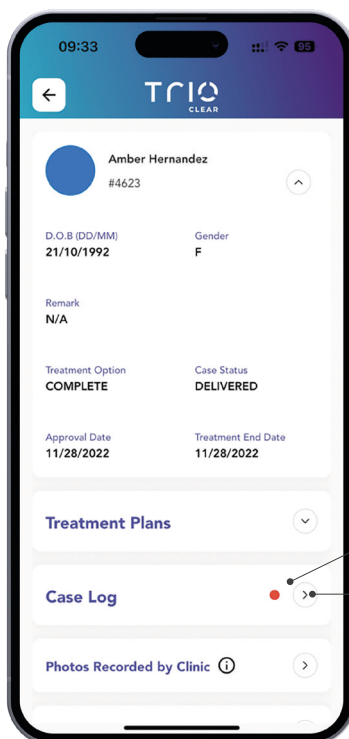

Meldingspunt
Synchroniseer met het inzendportaal

Open het casuslogboek

CASE LOG

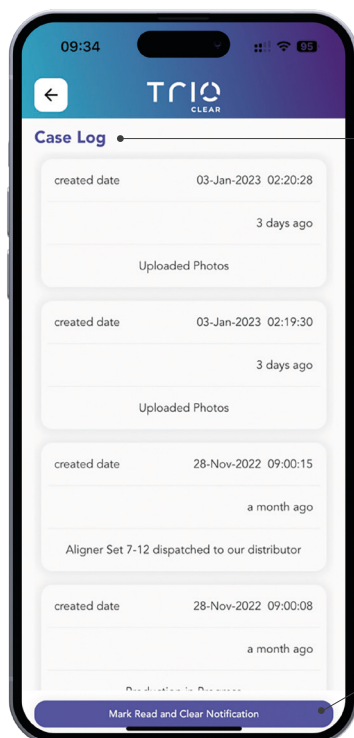


Toon volledig casuslogboek
Hetzelfde als het inzendportaal

Markeer als gelezen en wis melding
Synchroniseer met het inzendportaal


PATIËNTENBEHEER

Behandelplan


GEDETAILLEERD BEHANDELPLAN

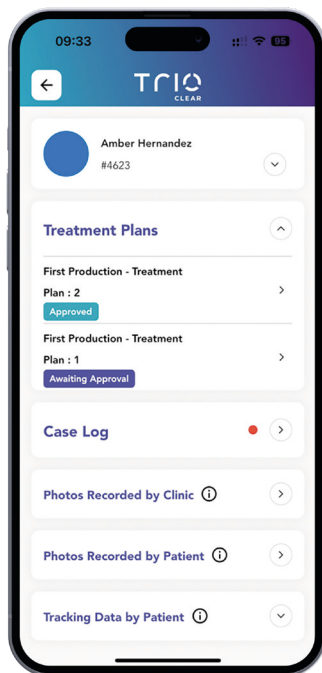

Toon het **behandelplan**,
de opname en de status


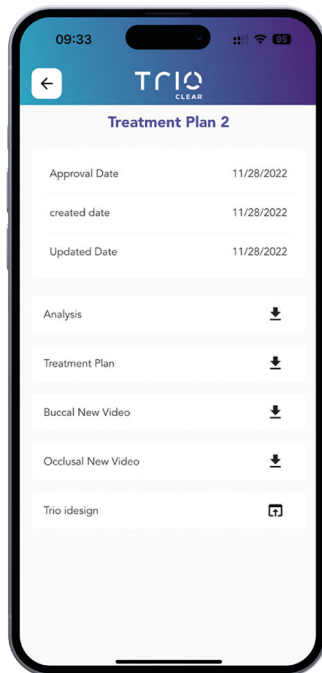


Toon dezelfde set **documenten**
in **het behandelplan**

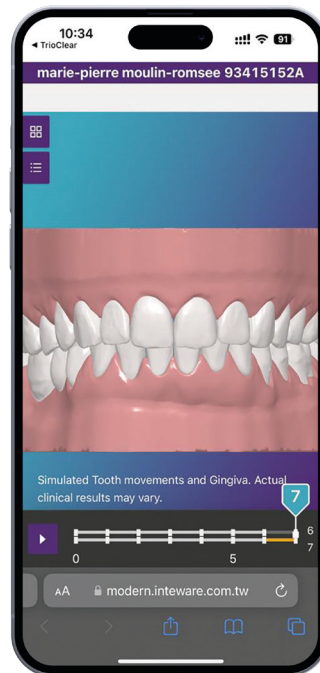

Kan linken naar **TrioClear iDesign**
mobiele versie
(Kan het plan niet wijzigen)

BEHANDELPLAN GOEDKEUREN

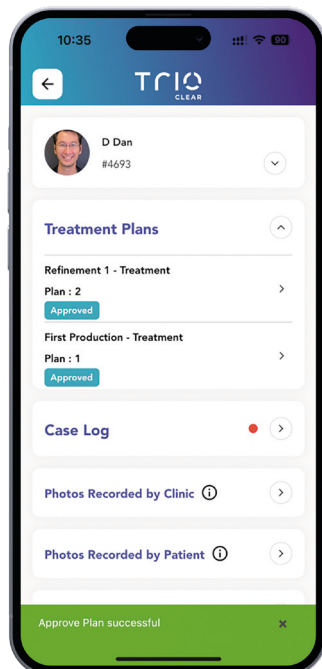
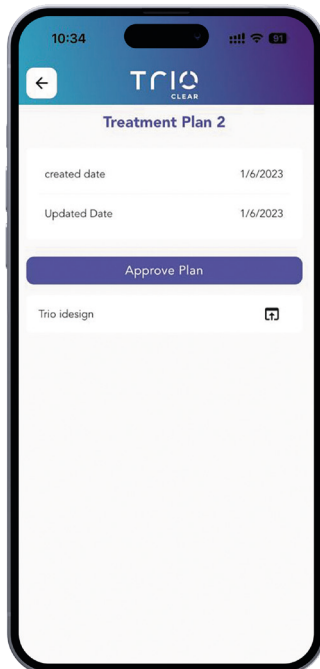


Goedkeuren van behandelplan is beschikbaar

PATIËNTENBEHEER


Functie voor klinische foto-uploader

FOTO'S VÓÓR DE BEHANDELING

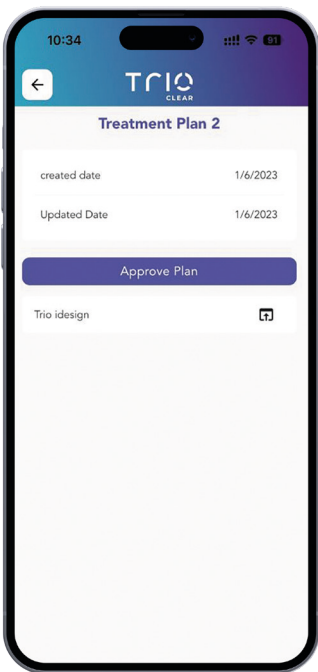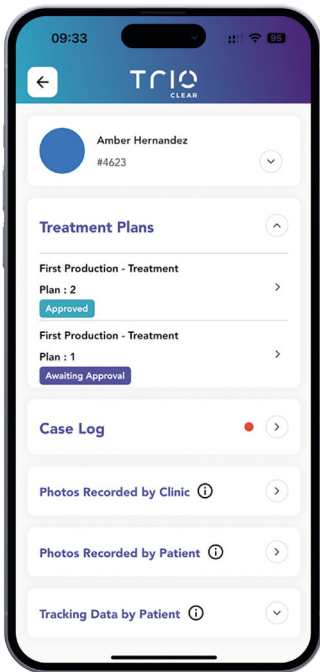


Fotosets genomen door de kliniek

FOTO'S VÓÓR DE BEHANDELING

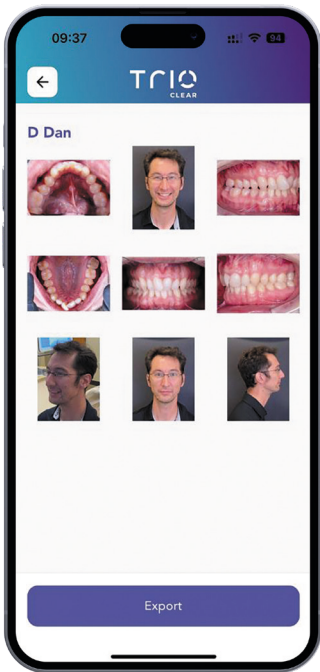

NIEUWE FOTO'S TOEVOEGEN

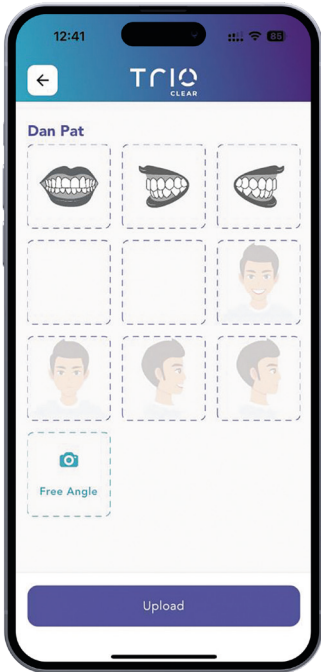

Fotografeerproces



PATIËNTENBEHEER

Foto's gemaakt door de kliniek

Submission Portal -> Patient -> View photos

Foto's kunnen worden gevonden in "Bekijk foto's" op het inzendportaal. Alleen voor intern gebruik.






PATIËNTENBEHEER


Foto's gemaakt door de patiënt / Gegevens bijhouden door de patiënt

FOTO'S GEMAAKT DOOR DE PATIËNT


GEGEVENS BIJGEHOUDEN DOOR DE PATIËNT

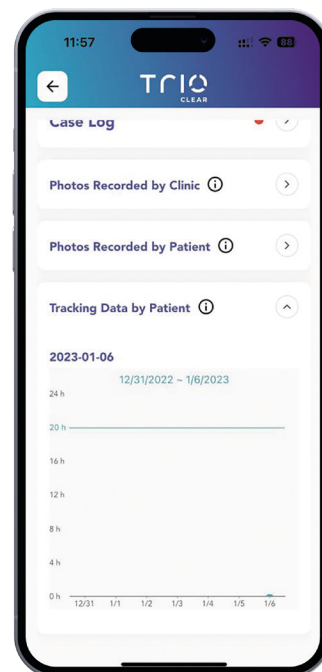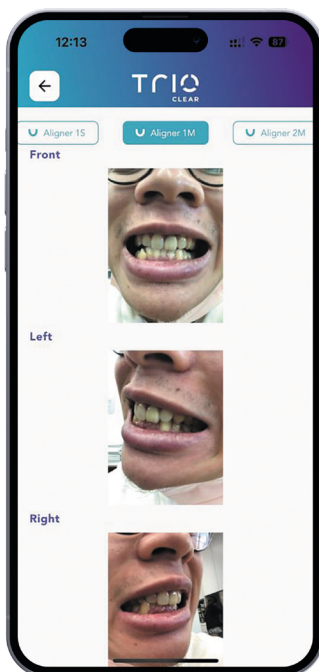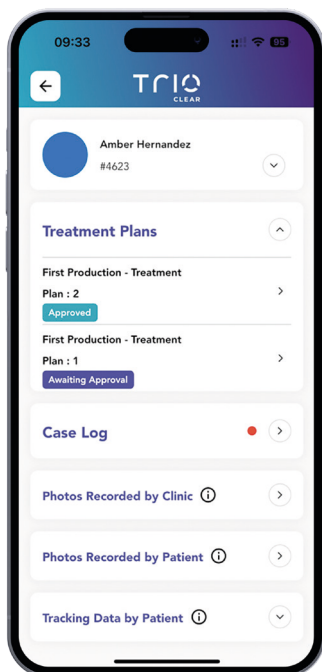


NIEUWE CASUS / REFINEMENT

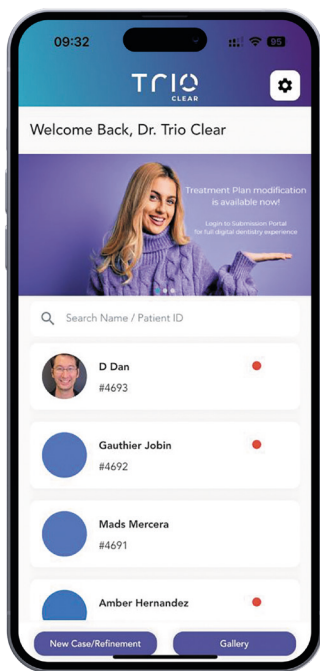

Kies “Nieuwe casus / Refinement”

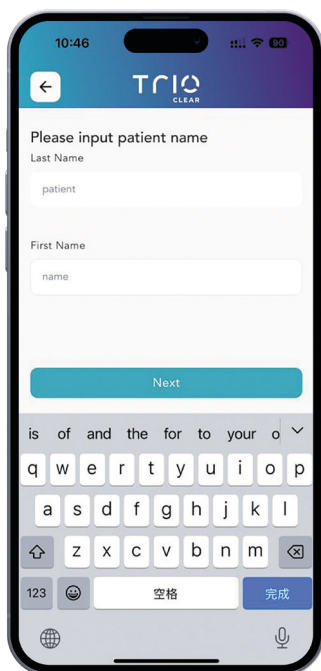

Voer de **naam** van de patiënt in om een **fotomap** aan te maken

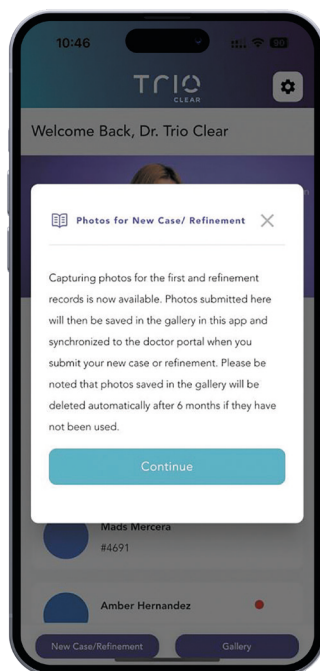

Herinnering


- Door de TrioClear-app te gebruiken, kunt u eenvoudig foto's maken voor een nieuwe casus & refinement en deze rechtstreeks uploaden naar het inzendingportaal van de arts.
- Maak een casus aan, kies de fotomap, dien de casus in op het inzendingportaal van de arts. on Portal



STANDAARD FOTO'S

Het proces voor het maken van foto's bij het aanmaken van een nieuwe casus

VERPLICHTE FOTO'S

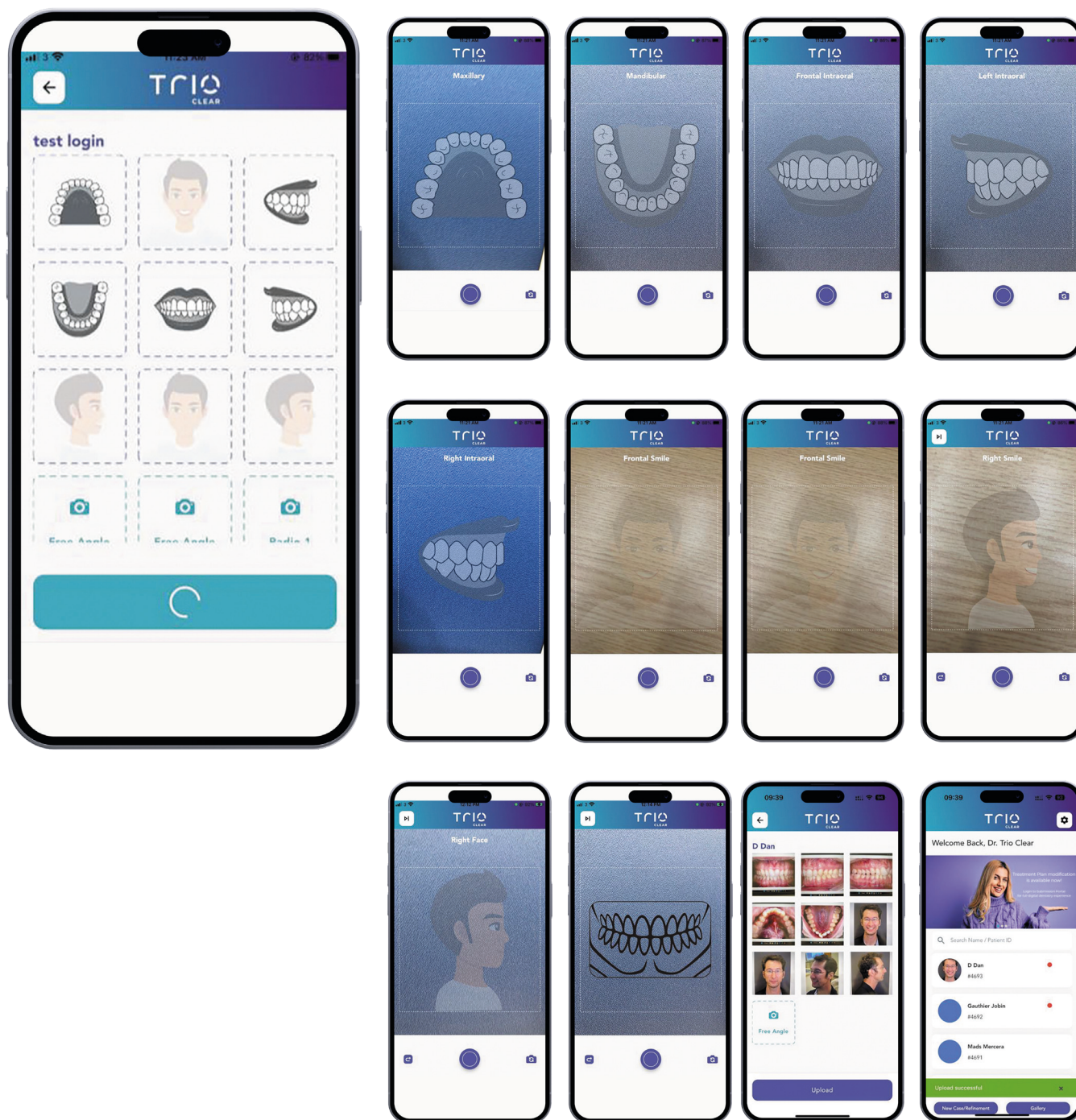

"Twee extra slots voor 'vrije hoeken' zijn toegevoegd in de procedure voor extra referentie voor artsen."

"Radiografieën" x 2 slots zijn toegevoegd in de procedure en kunnen eenvoudig foto's maken en uploaden via de TrioClear™-app.

Laatste controle

Succesvol geüpload


NIEUWE CASUS REFINEMENT

Waar kunt u de fotomap vinden?

CASUSBEHEER IN HET INZENDPORTAAL




FOTOMAP IN HET INZENDPORTAAL

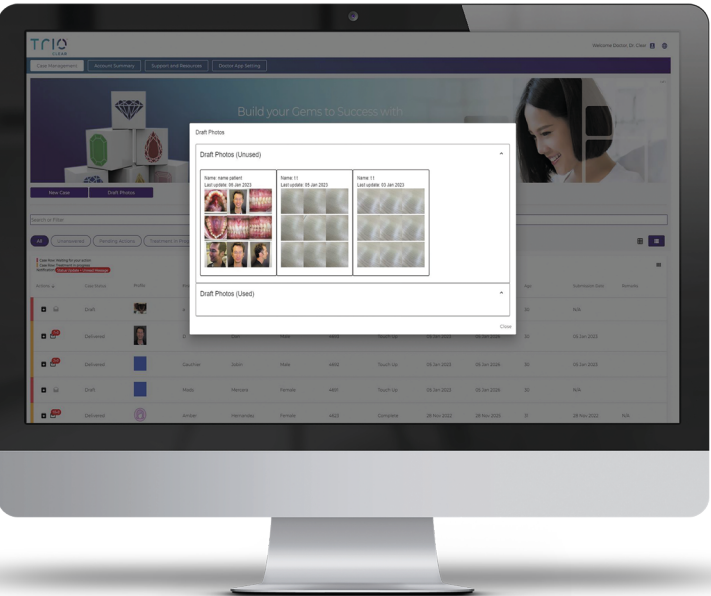

NIEUWE CASUS REFINEMENT



Waar kunt u de foto's selecteren bij het maken van een casus?

NIEUWE CASUS / REFINEMENT MAKEN IN HET INZENDPORTAAL

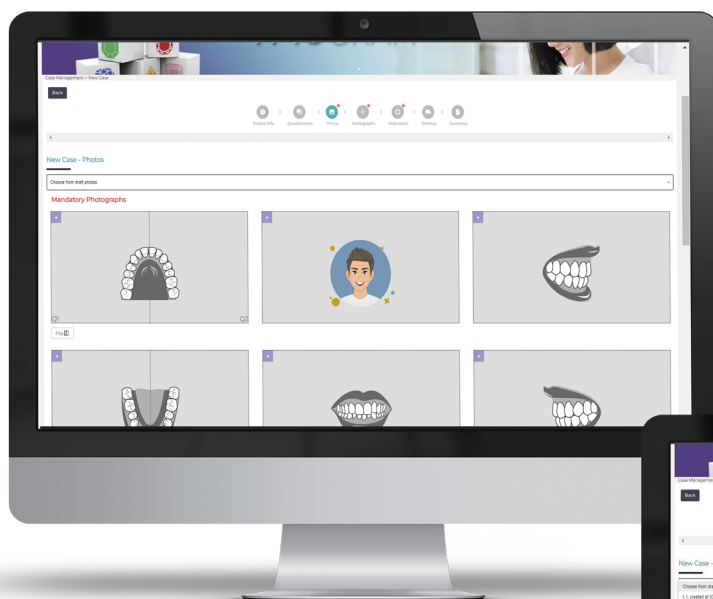


SELECTEER DE PATIËNTNAAMINVOER VANUIT DE MOBIELE APP IN HET INZENDPORTAAL

FOTO'S DIRECT INVOEGEN IN HET INZENDPORTAAL

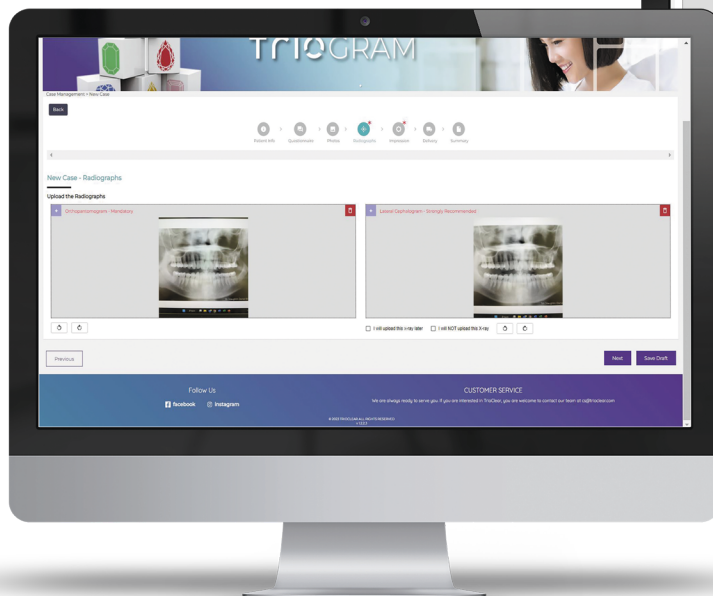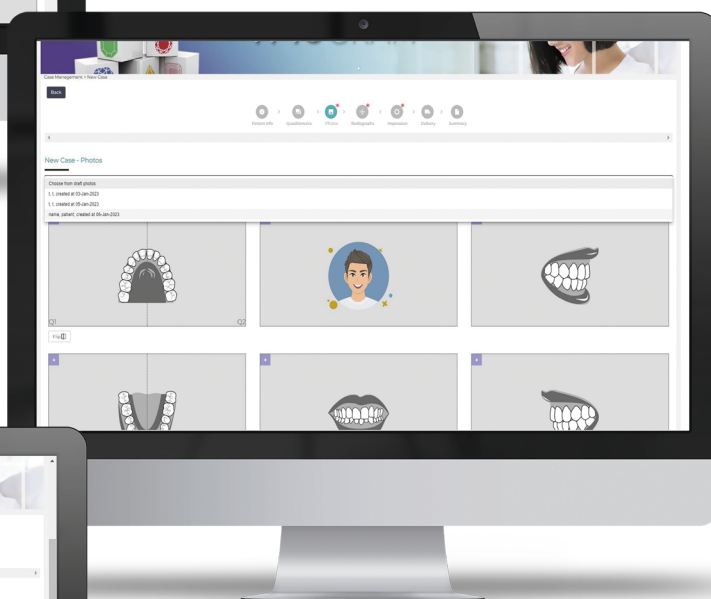

GALERIJ


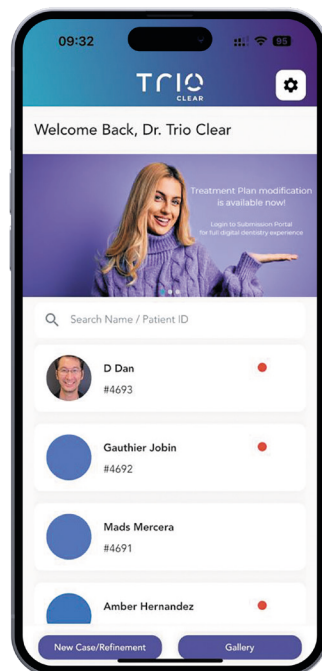


Kies "Galerij"




Bekijk de fotoset die is genomen met de TrioClear™-app


U kunt nog steeds de foto wijzigen voordat u deze gebruikt om uw casus/refinement in te dienen.

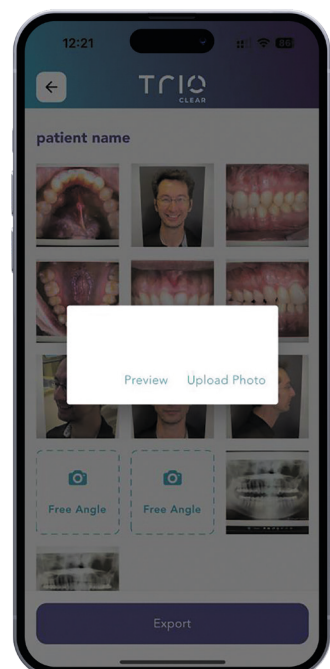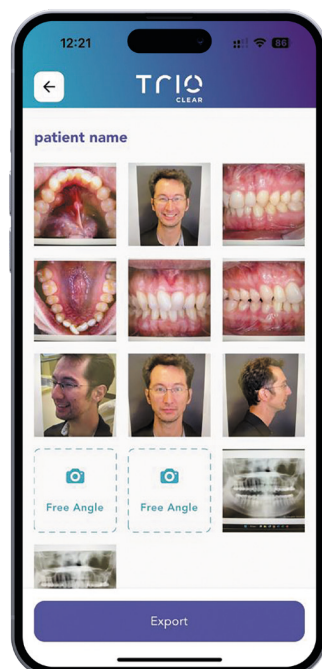


INSTELLINGEN - MIJN APP-ACCOUNT

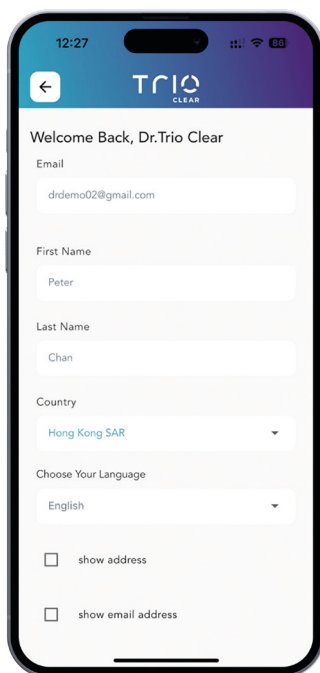

Instellingen wijzigen

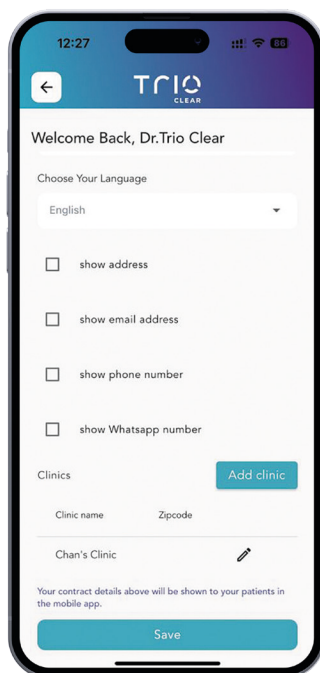

Opties om hun contactmethode weer te geven op het patiënteninterface

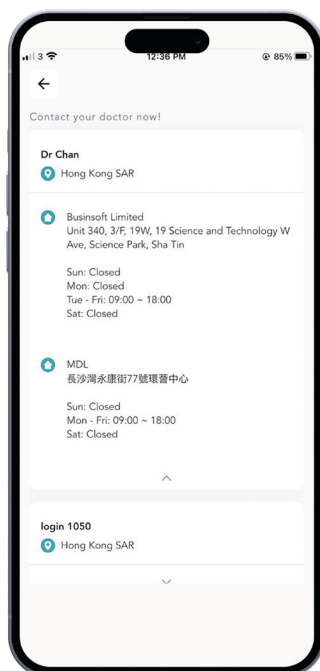

Een beheerdersrol is vereist om eventuele aanpassingen op het inzendportaal goed te keuren.



MAKE YOUR PATIENTS **SMILE**

Follow us on **social media** TrioClear™ professionals

